

- Para el envío de pajuelas ó pastillas congeladas, éstas deben ser remitidas en termos con nitrógeno líquido correctamente rotuladas .
  
- De acuerdo al análisis se recomiendan: dos (2) pajuelas para calidad seminal, 2 (dos) para microbiología, 1 (una) para aislamiento viral .
  
- Tanto para el análisis microbiológico como virológico, éstas pueden enviarse refrigeradas.
  
- No se recomienda el envío de semen fresco, debido a que en su traslado hasta el laboratorio puede verse afectada su calidad, ya que habría que mantener la temperatura constante en 37° C. En caso de ser necesario consultar previamente.

**Tabla de aprobación y distribución**

	<i>ELABORACIÓN</i>	<i>REVISIÓN</i>	<i>APROBACIÓN</i>	<i>REVISIÓN II</i>	<i>REVISIÓN III</i>	
<i>Firma</i>						
<i>Función</i>	<i>Personal del proceso</i>	<i>RD</i>	<i>Resp. del Proceso</i>			
<i>Fecha</i>	11/11/09	12/11/09	12/11/09			
<i>DISTRIBUCIÓN</i>						
<i>Normas ISO S.I</i>						