

Enfermedades de las abejas: Instructivo Toma de muestras**Varroasis:** (*Varroa destructor*)

Frasco de boca ancha con alcohol 70%

Muestrear el 10 a 15% de las colmenas del apiario

Colocar en el frasco 300 abejas (aproximadamente) de ambas caras de tres cuadros de cría diferentes de cada colmena.

El resultado se expresa en % de infestación

Importante: éste tipo de diagnóstico sólo determina la infestación en fase forética (ácaros sobre las abejas) y NO detecta el nivel de infestación de la cría.

Recomendaciones: realizar el diagnóstico previo al tratamiento, y luego repetir el mismo a las 3-4 semanas para evaluar su eficacia.

Nosemosis (*Nosema apis*)

Frasco de boca ancha con agua con 4% de formol

Colocar en el frasco 60 a 80 abejas de la piquera (adultas).

Muestrear el 5-10% de las colmenas en forma individual, identificar la muestra y la colmena para repetir el análisis.

Recomendaciones: realizar controles cada 15-20 días en el otoño y primavera, para evaluar el nivel de infestación e iniciar el tratamiento.

Loque Americana (*Paenibacillus larvae*)

Enviar al laboratorio los cuadros de cría con sospecha de la enfermedad (cría salteada, cría muerta, etc.) envueltos en papel.

Tabla de Aprobación y distribución

	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	REVISIÓN II	REVISIÓN III	
<i>Firma</i>						
<i>Función</i>	<i>Personal del proceso</i>	<i>RD</i>	Resp. del Proceso			
<i>Fecha</i>	<i>06/04/10</i>	<i>09/04/10</i>	<i>09/04/10</i>			
DISTRIBUCIÓN						
<i>Normas ISO S.I</i>						