

- En el caso de bovinos, encerrar los animales 4 a 6 hs. antes del trabajo, cuidando de no agregar stress, evitando el uso de perros, caballos en el embudo, etc.
- Se deben utilizar jeringas y agujas NUEVAS, sin uso previo y menos aún, LAVADAS.
- En grandes animales, tomar la muestra de la vena yugular. Se pueden usar agujas 1,20 x 40 ó 25 x 8. DESCARTAR SANGRAR DE LA COLA.  
En pequeños animales se pueden usar las agujas finas (25 x 5/8) tratando de no hacer demasiado vacío con el émbolo, dado el escaso caudal de las venas radial o femoral, para no hemolizar la muestra.
- Si la muestra requiere anticoagulante, usar el material provisto por el Laboratorio de acuerdo a la determinación a realizar, respetando la indicación de volumen de sangre para hemogramas. Colocar 2 ml de sangre en el tubo con EDTA (tapón y etiqueta color lavanda). Agitar bien, SIN DEBILIDAD, PERO CON MUCHO CUIDADO. Son suficientes unos 10-20 movimientos.
- Los tubos para suero deben ser, en lo posible, de vidrio o de calidad recomendada por el Laboratorio, descartando los lavados y re-usados.
- Rotular cuidadosamente cada tubo.
- Enviar lo antes posible las muestras al Laboratorio en caja con refrigerante. NO CONGELAR. Recordar que las eritrosedimentaciones se deben procesar antes de 24 Hs en equinos, caninos y felinos.
- Adjuntar con las muestras la orden de análisis firmada describiendo lo solicitado y el dueño o establecimiento.